

# 의료용봉합유지기 사용설명서

**품목명** : 의료용봉합유지기

**모델명** : Y-closure

**허가번호** : 수신21-984호

## [사용목적]

### 1. 의료용봉합유지기

봉합사의 장력을 환부보다 넓은 부위로 분포시켜 상처 치료를 보조하는 데 사용하는 기구로서 잔류 브리지, 외과용 버튼, 봉합받침 등을 포함한다.

### 2. 의료기구용클립

인체조직을 제외한 의료기기 등을 일시적으로 고정하거나 잡아주기 위해 사용하는 기구. 단순히 접착력만으로 부착하는 테이프형태의 제품(반창고)은 제외한다.

## [사용방법]

### 가. 사용 전 준비사항

- 1) 부착 부위를 정한 후 노폐물이 없도록 닦는다.
- 2) 제품 및 제품의 포장에 이상이 있는지 확인 한다.

### 나. 사용 방법

1. 의료용봉합유지기
  - 1) 점선을 따라 의료기구용클립을 제거 한다.
  - 2) 봉합유지기 양 끝의 손잡이를 조심스럽게 당겨 피부가 봉합 상태가 되게끔 위치한다.
2. 의료기구용클립
  - 1) 제품을 포장에서 꺼낸다.
  - 2) Adhesive가 있는 쪽이 제품의 바깥쪽이 된다.
  - 3) 뒷면 부착 부위의 이형지를 제거한 후 제품을 인체에 점착 한다.
  - 4) 제품의 가운데 adhesive 부분에 튜브 등 연결 기구를 위치시킨 후 양쪽의 벨크로를 교차하여 고정시킨다.

## [사용시 주의 사항]

- 1) 제품 사용 시 이물질이 없는지 확인한다.
- 2) 해당 제품은 1회용으로 한 번 사용 후 폐기 한다.
- 3) 해당 제품은 멸균 처리 되어 있으므로 개봉되거나 포장에 데미지가 있는 경우 사용을 금한다.
- 4) 유효기간이 지난 제품은 사용하지 않는다.
- 5) 전문 의료인에 의해 사용되어야 한다.
- 6) 반드시 정해진 용도로만 사용하고 용도 이외의 사용은 금한다.
- 7) 사용 전 주의사항 및 사용 설명서를 숙지한다.
- 8) 부작용/가려움, 알러지 반응이 나타날 경우 전문의와 상의한다.
- 9) 본 제품은 일회용 의료기기로 재사용을 금지한다.

## [제조번호, 제조연월일]

포장 참조

## [저장방법]

직사광선을 피하고 먼지와 습기가 없는 곳에서 실온 보관할 것.

## [사용 후 관리 및 보관방법]

사용 후에는 사용자의 폐기관리 절차에 따라 폐기한다.

## [유효기간]

제조일로부터 36개월

## [포장단위]

제조원 포장단위

## [수입자] 주식회사 성원메딕스

서울특별시 강남구 테헤란로28길 42, 3층

## [제조자] Shandong Succare Medical Co., Ltd

NO.27, Zihe Avenue, Zhangdian

District, Zibo, 255051, Shandong, China

## [부작용 보고 관련 문의처]

한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

본 기기는 '일회용 멸균 의료기기'로 재사용 금지

